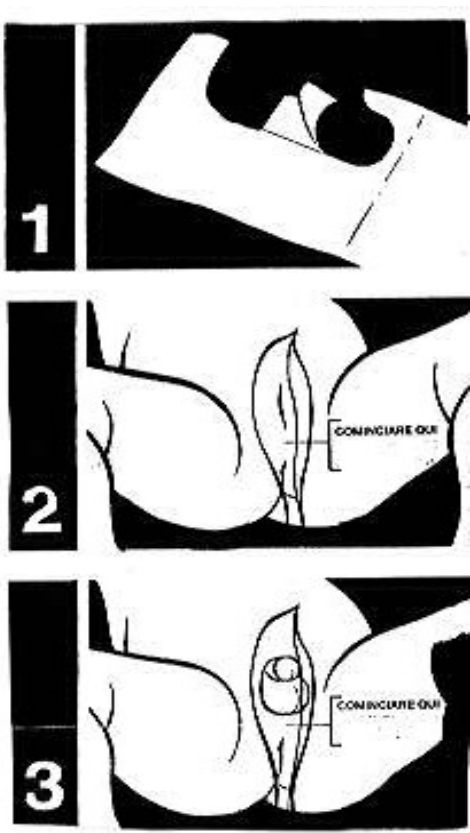


تحليل البول لدى الأطفال من الكيس تعليمات جمع العينات

	<p>قُم بالتنظيف والتطهير المناسب للمنطقة التناسلية باستخدام الماء والصابون. افرد ساقى الطفل عن بعضهما. تأكد من أن جلد العانة والعجان نظيف وجاف تمامًا (استخدم ورقًا يمكن التخلص منه للتجفيف). لا تضع المساحيق أو الزيوت أو المستحضرات على الجلد.</p> <div data-bbox="438 638 909 1467"></div> <ul style="list-style-type: none">• قم بإزالة الورق الواقي من السطح اللاصق المضاد للحساسية (الشكل 1)• للإناث: شد جلد العجان (الشكل 2) لتجنب طيات الجلد. اضغط على الجزء اللاصق بقوة على الجلد المحيط بالمهبل. ابدأ هذه العملية من المنطقة التي تفصل فتحة الشرج عن المهبل واستمر في العمل على السطح اللاصق من الأسفل إلى الأعلى.• للذكور: ضع الكيس مع الفتحة المقابلة للقضيب (الشكل 3)، اضغط على اللوحات اللاصقة بقوة على العجان لتجنب تكوين التجاعيد وتأكد من أن السطح اللاصق بأكمله يلتصق جيدًا بالجلد.• بعد التجميع، ضع الكيس داخل وعاء معقم، أو قم بصب البول مباشرة داخل الحاوية دون تلوين أي شيء.• يجب ألا يظل الكيس مطبقًا لأكثر من ساعة واحدة. إذا لم يتم التجميع بعد ساعة واحدة، كرر استخدام كيس جديد بعد النظافة الجديدة للمنطقة التناسلية.
التخزين	قم بتسليم الحاوية/الأنبوب إلى مركز التجميع خلال ساعات العمل وخلال ساعتين من التجميع.
ملاحظات	اتبع الطرق الموضحة.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta_Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	06/02/2024	01	8 di 19